

Trin 1: Sådan opretter du en patientkonto

Du vil modtage en e-mail fra din læge/sygeplejerske med overskriften «Dit behandlingssted opfordrer dig til at tilmelde dig diasend®». Klik på linket i e-mailen med teksten [Klik her for at komme i gang](#), og følg nedenstående trin. Hvis du ikke har modtaget en e-mail, kan du oprette en konto på www.diasend.com ved at klikke på knappen «Registrer her».

1 Login-detajler

Indtast din e-mailadresse, som fungerer som dit brugernavn, samt en selvvalgt adgangskode til din diasend®-konto. Klik på Fortsæt.

2 Personlige oplysninger

Indtast dine personlige oplysninger, og klik på Fortsæt.

3 Del data

Hvis du modtager en invitation fra dit behandlingssted via e-mail, vil klinikens id-nummer allerede være angivet. Det er et entydigt id-nummer for din klinik, der gør det muligt for dig at dele dine data med dem. Klik på Fortsæt.

Hvis du ikke har modtaget en invitation, kan du tilføje klinikens id-nummer senere. Færdiggør registreringen, log derefter ind på din konto, og gå til fanen «Kontoprofil».

4 Bekræft registrering

Markér afkrydsningsfeltet for at godkende vilkår og betingelser og for at bekræfte registreringen. Klik på Fortsæt.

5 Download og installer diasend® Uploader

Installer diasend® Uploader på din pc eller Mac ved at klikke på det relevante ikon. Følg installationsinstruktionerne på skærmen.

Har du brug for hjælp?

Kontakt os på support@diasend.com eller +46 (0) 31 762 08 88