

Glucomen Areo overfører trådløst blod-sukkerværdier via Near Field Communication (NFC). Det er en overførselsstandard til berøringfri udveksling af data over korte afstande (< 1 cm).

Producenter som supporterer NFC:

Apple iPhone*, Samsung, Sony, HTC, LG, Google, Nokia, Philips, Huawei, m.fl.

*Glucolog lite app og Hedia app er kompatible med Appel iPhone 8 og frem, og det kræver at du har en Glucomen areo (fra serie nummer EQ493 og frem) eller en Glucomen areo 2K (fra serie nr HC109 og frem) Har du ikke det, kontakt Menarini kundeservice Tlf: 4220 2051.

Du skal bruge:



En Glucomen Areo blodsuktermåler



En smartphone

Glucomen[®]
areo



Dagbogs app, f.eks. Glucolog Lite eller Hedia

Forberedelse

Aktiver NFC på din Areo
(kun første gang)

Tryk og hold på knappen "M" til der står "SET"



Tryk på pil-knappen, indtil N)) blinker



Tryk på knappen "M" til "On" blinker

Tryk på "M" igen for at bekræfte



Aktiver NFC på din smartphone

Gå ind i "Indstillinger"

Find "NFC" og "Aktiver"



Start din app

Her Glucolog Lite



OBS! Dette er forskelligt i forskellige apps!

Tryk på symbolet for at "hente data"



Overførsel af data

Hold dem ryg mod ryg – indtil du hører et bip



Fungerer selv med måleren i etui!



Når "End" vises, er det klart!



Instruktionsfilm og info om Glucomen Areo finder du på: www.areo.nu/da