

Trin 2: Sådan overfører du data til diasend®

1

Start diasend® Uploader


Dobbeltklik på ikonet diasend® Uploader på din computer. (Hvis du har en Mac, gå du til «Programmer» eller «Launchpad» for at finde diasend® Uploader).



2

Tilslut enhedens kabel

Tilslut kablet fra din enhed til en USB-port på din computer.

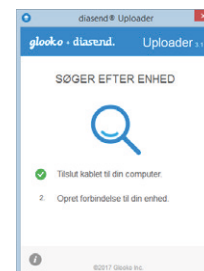


3

Tilslut din enhed til kablet

Tilslut enheden til kablet, eller placer den foran en IR-dongle.


BEMÆRK: Hvis du har brug for mere specifikke instruktioner om, hvordan du uploader data fra din enhed, kan du bruge diasend® Personal Quickguide på support.diasend.com.

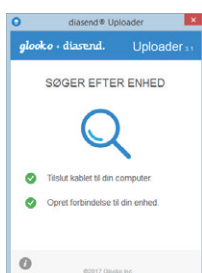

4

Enheden begynder at uploade


Undgå at frakoble din enhed, før uploadprocessen er helt færdig.

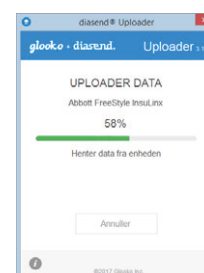

5

Bekræft din konto


Indtast dit brugernavn (hele din e-mailadresse og den adgangskode, du valgte, da du oprettede din konto). Klik på Log ind.

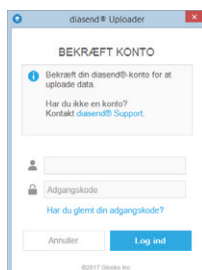

6

Se dine data

Log ind på www.diasend.com for at se dine data.

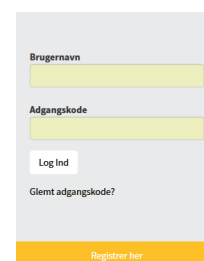

Eksempler på rapporter og diagrammer

