

## GlucoMen<sup>®</sup> areo – Kratko uputstvo za upotrebu

Kako da vršite merenje koncentracije šećera u krvi

1



Novu traku za testiranje GlucoMen<sup>®</sup> areo stavite gore u aparat za merenje.

2



Uzmite jednu kap krvi.

3



Nanesite jednu kap krvi na kraj trake za testiranje.

4



Posle 5 sekundi pojaviće se rezultat merenja.

5





Pritisnite taster za izbacivanje, da biste higijenski odstranili traku za testiranje.



# GlucoMen<sup>®</sup> areo informacije na ekranu

## Saopštenje

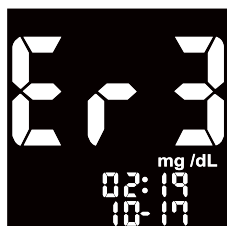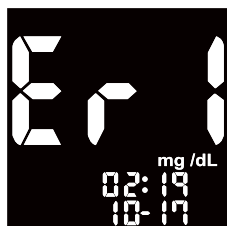

## Šta znači informacija?

Greška hardver sistema

Traka za testiranje je korišćena ili je oštećena

Greške uzorka krvi

Traka za testiranje je bila prerano odstranjena

NFC-veza prekinuta

## Šta moram da radim?

Obratite se našem servisu  
Telefon: +49 - 800 - 45 82 66 36  
(besplatno)

Koristite novu traku za testiranje

Na novu traku za testiranje nanesite više krvi

Ponovite merenje sa novom trakom za testiranje.

Ponovite prenos podataka

