


GlucoMen Areo överför trådlöst blodsockervärden med sk Near Field Communication (NFC). Det är en överföringsstandard för kontaktlöst utbyte av data över korta avstånd (< 1 cm).

Tillverkare som stödjer NFC: Samsung, Sony, HTC, LG, Google, Nokia, Philips, Huawei, m.fl. Apple iPhone stödjer inte NFC utan kräver att BT-Device används

Detta behöver du:



En GlucoMen Areo blodsockermätare

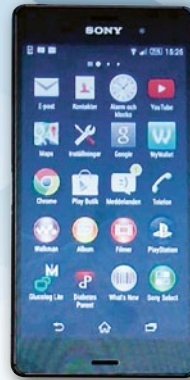

En android smartphone

**GlucoMen**<sup>®</sup>  
*areo*

**Förberedelser**

**Aktivera NFC på din Areo**  
(endast första gången)

Håll in "M"-knappen till det står "SET"



Tryck på pilknapparna tills N)) blinkar



Ändra med pilknapparna till "ON".

Bekräfta med "M".



**Aktivera NFC på din Smartphone**

Gå in i "Inställningar"

Leta upp "NFC" och "Aktivera"



**Starta din app**

Här GlucoLog Lite



OBS! Detta moment är olika i olika appar

Tryck på symbolen för "hämta data"



**Överföring av data**

För ihop rygg mot rygg -tills du hör ett pip



Funkar även med mätaren i väskan!



När "End" visas är det klart!



På [www.diabetesappar.se](http://www.diabetesappar.se) kan du se vilka appar som stödjer **GlucoMen Areo**. Diabetesappar.se är en website framtagen i samarbete med svensk vårdpersonal och svenska appleverantörer för att underlätta vardagen för både patienter och deras kontakter inom vården.



Instruktionsfilm på [www.areo.nu](http://www.areo.nu)  
Gilla GlucoMen på Facebook  
[shop.menariniagnostics.se](http://shop.menariniagnostics.se)  
[www.diabetesappar.se](http://www.diabetesappar.se)



**A.MENARINI**  
diagnostics