

# راهنمای سریع

## GlucoMen® (areo)




نظارت بر گلوکوز خون با استفاده از بیسیم

**A.MENARINI**  
diagnostics


### شما چگونه می‌توانید از دستگاه گلوکوکت دو ال پلس (GlucoJectDualPLUS) استفاده کنید

احتیاط! هرگز از سوزن برای بیشتر از یک نفر استفاده نکنید. برای هر تست از سوزن جدید استفاده کنید و بعد از ختم تست سوزن را در سوزن گیر نگذارید.


**4.** برای بستن دستگاه دسته آن را بیرون بکشید. دستگاه را به ناخن خود چسبانده دکمه آزاد را فشار دهید.

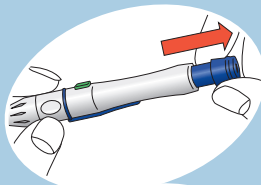


**5.** برای بیرون کردن سوزن استفاده شده، سوزن پیران را با شست خود به پیش فشار دهید و دسته لغزنده بیرون بکشید.

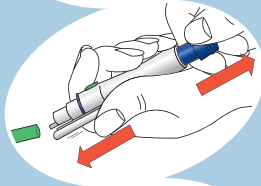


**تست کردن (مکان تست)**  
دستگاه را در محل تست فشار داده نگهدارید. برای چند ثانیه همانطور نگهدارید، بعد برای گرفتن نمونه خون دکمه آزاد را فشار دهید.

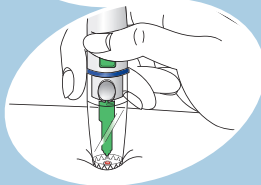


**1.** دست های خود و جاهای مختلف تست شونده را بشویید. با پیچاندن سرپوش زیرین در جهت مخالف عقربه ساعت آنرا باز کنید.

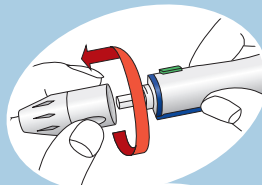

**2.** یک سوزن جدید ضد عفونی شده را در سوزن گیر قرار داده محکم فشار دهید.

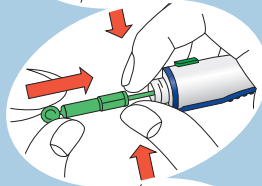

**3.** با چرخاندن نوک آن عمق فرو رفتن آن را تعیین کنید. 2-1 برای پوست های نرم، 3 برای پوست های معمولی، 4-5 برای پوست های ضخیم و سخت.

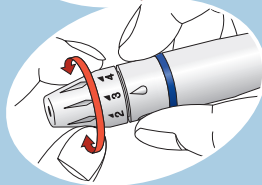

### کود های خطا و پیام ها

- ER 1** خطای سخت افزاری سیستم. بطری را بیرون آورده و دوباره ببندازید و تست را با یک سوزن جدید تکرار کنید. اگر خطا هنوز باقی بود، با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- ER 2** سوزن تست آسیب دیده یا از آن استفاده شده است و یا اینکه به خاطر نمونه خونی که پیش از این گرفته شده است، علامت قطره خون در نمایشگر مشاهده میشود. تست را با استفاده از یک سوزن جدید تکرار کنید.
- ER 3** مقدار خون در سوزن تست کافی نیست. تست را با یک سوزن جدید تکرار کنید تا مقدار کافی خون به دست آورید.
- ER 4** در جریان تست، سوزن تست بیرون آورده شده یا حرکت داده شده است. تست را با یک سوزن جدید تکرار کنید.
- ER 5** عمل انتقال (NFC) قطع شده است. عمل انتقال (NFC) را دوباره ادامه دهید. در صورتیکه مشکل ادامه داشته باشد، با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- HI** نتیجه تست شما بیشتر از 33,3 mmol/L ملی مول/لیتر است!
- LO** نتیجه تست شما کمتر از 1,1 mmol/L ملی مول/لیتر است!

**احتیاط!** در صورتیکه اختطاریه های HI یا LO را مشاهده کردید قبل از هرگونه اقدامی با دکتر خود تماس بگیرید. در صورتیکه گلوکوز خون شما نه بالا و نه پایین باشد، و دستگاه شما همواره اختطاریه های HI یا LO را نشان دهد، با خدمات مشتریان تماس بگیرید.

خدمات مشتریان: 040-32 12 70 info@menarinidiagnostics.se

## GlucoMen® (areo)




201604-01 GlucoMen areo

لطفاً به خاطر داشته باشید! این متن یک راهنمای خلاصه است. برای دریافت معلومات بیشتر می‌توانید از کتابچه راهنمای همراه دستگاه استفاده کنید.

### چه طور میتوانید گلوکوز خون خود را اندازه گیری کنید.

- زمان و تاریخ دستگاه از قبل در دستگاه تنظیم شده اند، اما شما نیز هنگامیکه بار اول از دستگاه استفاده میکنید خود را مطمئن سازید که آنها درست تنظیم شده اند.
- دستان خود را با آب و صابون بشویید.
- یک سوزن تست را از قفسی آن برداشته و پوش آن را فوراً بردارید.
- طرف فلزی سوزن را به سوراخ دستگاه داخل کنید.
- هنگامیکه دستگاه برای اندازه گیری آماده شده، علامت قطره خون را روی نمایشگر خود نشان میدهد.
- توسط یک سوزن تست یک نمونه خون بگیرید.
- قطره خون را در سر کوتاه سوزن قرار دهید، دستگاه مقدار لازم خون را به داخل خود میمکد. شما بعداً یک صدا میشنوید و نمایشگر به شمارش آغاز میزند.
- نتیجه تست را بخوانید. بعد از اینکه نتیجه بالای نمایشگر نشان داده شد (در صورتیکه دستگاه فعال باشد) شما یک صدا را میشنوید.
- برای اینکه سوزن استفاده شده دور کنید، دکمه سوزن پُران را فشار دهید. دستگاه به صورت خود کار خاموش میشود.

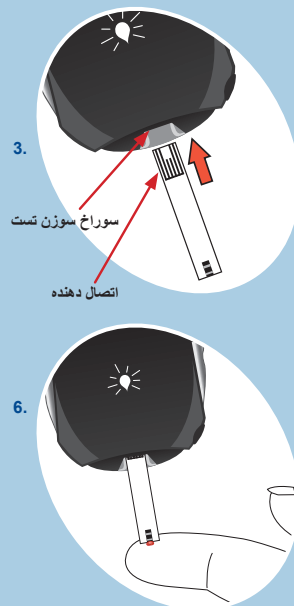

### چه طور میتوانید اندازه گیری های خود را ثبت کنید.

- بعد از اینکه نتیجه تست نمایش داده شد، دکمه را فشار دهید تا علامت ثبت ظاهر شوند. از دکمه های تیرک دار (▲▼) برای ثبت علامت مورد نظر استفاده کنید (قبل از غذا)، (بعد از غذا)، (تمرین) یا (عمومی).
- با فشار دادن دکمه خود را از ثبت علامت مطمئن سازید. با تکرار مراحل 1 و 2 شما میتوانید چندین نوع علامت را ثبت کنید (اما در یک زمان یکی از آن هارا نمیتوانید انتخاب کنید).

### چه طور زمان و تاریخ را تنظیم میکنید

- مطمئن شوید که دستگاه خاموش است. (در غیر آن دکمه را به مدت 3 ثانیه فشار دهید).
- برای ظاهر شدن لست تنظیم آن را به مدت 4 ثانیه فشار داده نگهدارید.
- برای تغییر ▲ لست تنظیمات آنرا فشار دهید تا لست بتوانید لست های مختلف را بخوانید.
- استفاده ▲ یا ▼ انتخاب اندازه. برای تثبیت و رفتن به مرحله بعدی آن را فشار دهید. داده نگهدارید: سال، ماه، روز، فرمت زمان، ساعت، دقیقه.
- بعد از اینکه دقیقه ها را تنظیم کردید (با فشار دادن دکمه) شما به لست تنظیمات میروید.

### طریقه خواندن نتایج موجود در حافظه

- دستگاه شما تا 730 نتیجه را به شمول زمان و تاریخ آن در حافظه خود حفظ میکند.
- مطمئن شوید که دستگاه خاموش است. (در غیر آن دکمه را به مدت 3 ثانیه فشار دهید).
  - دکمه را دو دقیقه فشار دهید تا دستگاه روشن شود ("mem" در نمایشگر نمایان میشود).
  - آخرین نتایج تست با تاریخ و زمان خود ظاهر میشود.
  - برای دیدن معلومات حافظه دکمه را فشار داده ▲ و ▼ آنرا جستجو کنید.
  - برای خاموش ساختن دستگاه آنرا به مدت بیشتر از 3 ثانیه فشار داده نگهدارید.
- نمایش اوسط نتایج 1، 7، 14، 30، و 60 روزه.**
- دکمه دستگاه را برای 2 ثانیه فشار داده نگهدارید تا روشن شود. دوباره فشار دهید (دستگاه "AVG" یا اوسط را نشان میدهد). دستگاه اوسط همان روز را نشان میدهد.
  - برای نمایش اوسط 1، 7، 14، 30، و 60 روزه دکمه را فشار داده ادامه دهید.
  - برای خاموش ساختن دستگاه آنرا به مدت بیشتر از 3 ثانیه فشار داده نگهدارید.

**GlucoMen<sup>®</sup>**  
**areo**



### انتقال بیسیم از طریق NFC (انتقال در ساحه نزدیک)

- نتایج ثبت شده تست های شما میتواند از طریق وسیله NFC تعبیه شده در دستگاه و نرم افزار نصب شده در آن (مثلاً گلوکو لاگ (GlucoLog) مخابره گردد.
- زمانیکه بار اول از آن استفاده میکنید، شما باید با فشار دادن دکمه ▲ و ▼ انتخاب روشن یا خاموش کار برد NFC (که میتوانید در لست تنظیمات بیابید) را فعال سازید. برای انتخاب و خروج از آن دکمه را فشار داده نگهدارید.
- کاربرد انتقال از طریق NFC را در گوشی هوشمند خود فعال سازید.
  - دستگاه را نزدیک گوشی هوشمند خود قرار دهید (کمتر از یک سانتی متر).
  - دستگاه به صورت خود کار روشن گردیده و معلومات انتقال می یابد (N روی نمایشگر مشاهده میشود).
  - زمانیکه انتقال معلومات خاتمه یافت اصطلاح ختم (END) همراه با علامت (N) در نمایشگر ظاهر گردیده و شما یک صدا را میشنوید.
  - برای خاموش ساختن دستگاه آنرا به مدت بیشتر از 3 ثانیه فشار داده نگهدارید.

### طریقه تبدیل بطری دستگاه گلوکو مین ایریو (GlucoMen<sup>®</sup> Areo)

- این دستگاه از دو بطری CR2032 3V سه ولتی تغذیه میکند. زمانیکه علامت بطری ضعیف ظاهر گردید، زمان آن است که شما بطری ها را دو دقیقه بعد از بیرون آوردن بطری های کهنه تبدیل کنید. طریقه تبدیل آن قرار ذیل است:
- اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش است.
  - سرپوش بطری را که در پشت دستگاه قرار دارد باز کرده و بطری ها را بیرون آورید.
  - بطری های جدید را طوری داخل دستگاه قرار دهید که علامت مثبت «+» طرف بالا باشد.
  - سرپوش بطری را ببندید.

**GlucoMen<sup>®</sup>**  
**areo**

