

● NFC

NFC (Närfältskommunikation) är ett innovativt dataöverföringssystem som gör det möjligt att överföra testresultaten från din mätare **GlucoMen® areo** till en smartphone eller läsplatta **helt enkelt... genom att placera dem intill varandra!**

● A. MENARINI DIAGNOSTICS APPAR

Ladda ned dina blodsockeruppgifter till din smartphone eller läsplatta med **NFC**-systemet **är snabbt och enkelt!**

När du har laddat ned A. Menarini Diagnostics appar, kan du:



Direkt se grafer och statistik över dina blodsockeruppgifter med appen **GlucoLog® Lite** och skicka dem via e-post till din läkare eller en person du har förtroende för.



Skicka och dela dina testresultat i realtid med appen **GlucoLog® Mobile**.

Förberedning

Steg 1

LADDA NED



- Ladda ned och installera A. Menarini Diagnostics appar **Glucolog® Lite** och/eller **Glucolog® Mobile**. Som finns tillgängliga i versionerna Android, BlackBerry och Windows 8 på din mobila enhet (smartphone och/eller läsplatta).

Steg 2



- Aktivera funktionen **NFC** på din mätare **Glucomen® areo** genom att följa dessa enkla steg:
1) Tryck in **⏻** i fyra sekunder för att komma till inställningsmenyn.
2) Tryck på **▲** eller **▼** för att bläddra i inställningsmenyn. När du kommer till **N**, tryck på **⏻** för att öppna.
3) Tryck på **▲** eller **▼** för att välja **ON**, tryck sedan på **⏻** för att bekräfta och lämna.

Ladda ned data



- Placera NFC-antennen på din mätare **Glucomen® areo** intill (< 1 cm) antennen på den **NFC**-försedda enheten: dataöverföringen startar automatiskt och när den fullbordats visar mätaren "End".