


## ESECUZIONE DEL TEST



Con le mani pulite e asciutte, introdurre il sensore nello strumento fino in fondo: si sentirà un segnale acustico e sul display sarà visualizzato **Glu** (glucosio) o **Ket** (chetoni).\*

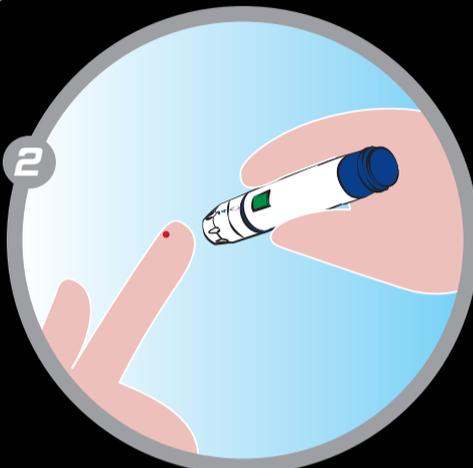


Effettuare il prelievo.




Tenere l'estremità del sensore a contatto con la goccia di sangue fino a che si sentirà un segnale acustico. Non premere i pulsanti laterali.

Il risultato comparirà sul display in solamente 5 secondi per la glicemia e 8 secondi per la chetonemia.

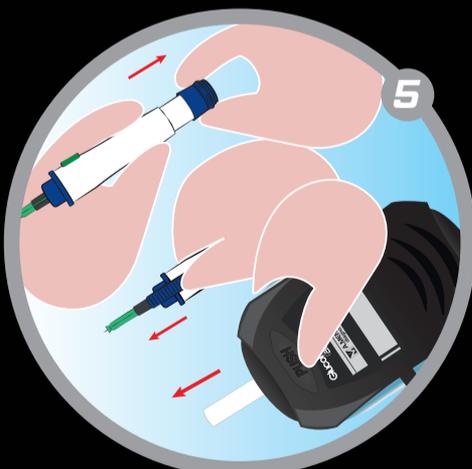

Smaltire la **lancetta** (ago) e il **sensore** in sicurezza grazie ai tasti di espulsione integrati.


Per i sensori della glicemia riportare la data di smaltimento sull'etichetta del flacone (data della prima apertura + 12 mesi).

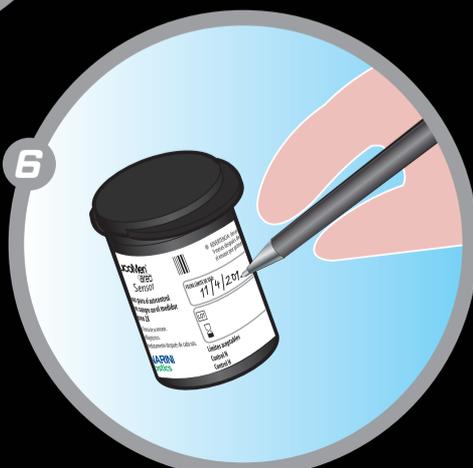


\* Lo strumento riconoscerà automaticamente se si tratta di un sensore per il monitoraggio della glicemia o della chetonemia.

GlucoMen<sup>®</sup>  
areo 2K

## GUIDA RAPIDA

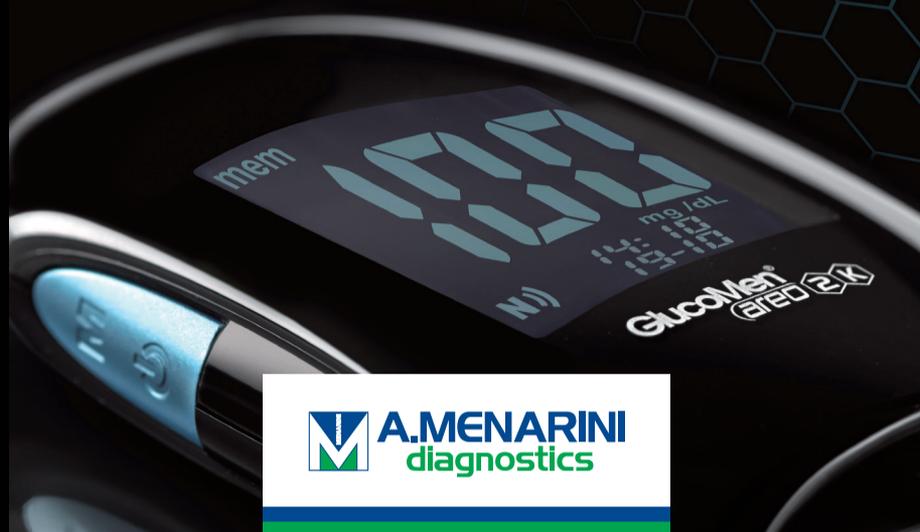

## DOWNLOAD DEI DATI TRAMITE NFC

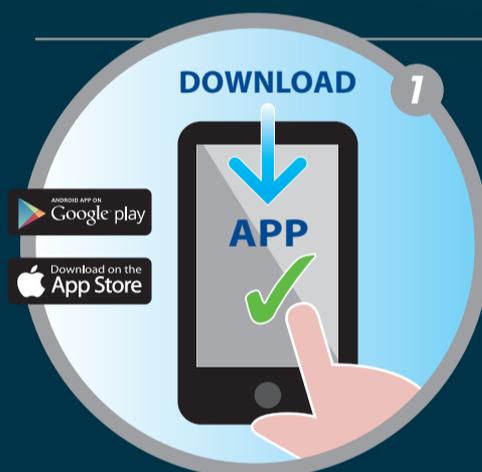

Accendi la funzione **NFC** del tuo dispositivo mobile e installa la app **GlucoLog<sup>®</sup> Lite** (disponibile gratuitamente su Google Play e App Store).

GlucoLog<sup>®</sup> Lite

### Accendi la funzione NFC del tuo GlucoMen<sup>®</sup> areo 2K.

- 1 premere simultaneamente **⏻** e **▲** per 2 secondi per accedere al menu impostazioni.
- 2 Premi **▲** / **▼** per scorrere le impostazioni: quando lampeggia **N**), conferma premendo **⏻**.
- 3 Premi **▲** / **▼** per selezionare ON, poi conferma ed esci premendo **⏻**.



Apri la pagina 'Ricezione' di GlucoLog<sup>®</sup> Lite e tieni lo strumento e il dispositivo mobile a contatto sui lati posteriori per qualche secondo. La trasmissione dei dati avviene automaticamente: concluso il download dei dati lo strumento si spegnerà automaticamente.

## CONSULTAZIONE DELLA MEDIA DEI RISULTATI GLICEMICI



Con lo strumento spento, tenere premuto il pulsante di accensione  per due secondi.

Quando **mem** e **Glu** compaiono sul display, premere il pulsante  per accedere alla memoria dei risultati glicemici.



Nella memoria, premere nuovamente  per la consultazione delle medie.



Consultare le medie per 1, 7, 14, 30, 60 o 90 giorni utilizzando il pulsante .



Conclusa la consultazione, spegnere lo strumento tenendo premuto il pulsante  per 5 secondi.



# GlucMen<sup>®</sup> areo 2K

## CONSULTAZIONE DEI DATI MEMORIZZATI



Con lo strumento spento, tenere premuto il pulsante di accensione  per due secondi.



Quando **mem** compare in alto a sinistra sul display, utilizzare i pulsanti  /  per accedere alla memoria che si desidera consultare: **Glu** per il glucosio e **Ket** per i corpi chetonici. Premere  per confermare.

Per visualizzare sul display i risultati precedenti, utilizzare i pulsanti  / .



Per modificare la selezione, tenere premuto per due secondi il pulsante  e poi selezionare **Glu** o **Ket** con i pulsanti  / . Premere  per confermare.



Conclusa la consultazione, spegnere lo strumento tenendo premuto il pulsante  per 5 secondi.

