

GlucoMen[®] areo Kratka uputa za uporabu

Kako izmjeriti razinu glukoze u krvi

1



Novu mjernu traku GlucoMen[®] areo umetnite gore u mjerač.

2



Pomoću lancetara dobijte kрни uzorak.

3



Nanesite kapljicu krvi na kraj mjerne trake.

4



Poslije 5 sekundi pojavit će se rezultat mjerenja.

5




Pritisnite tipku za izbacivanje i na primjeren način odstranite mjernu traku.



GlucoMen[®] areo informacije na zaslonu

Priopćenje

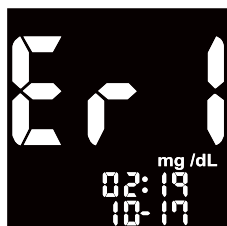

Što znači informacija?

Greška hardver sistema

Što moram raditi?

Obratite se na besplatni broj korisničke podrške 0800 71 71



Mjerna traka testiranje je korištena ili je oštećena

Koristite novu mjernu traku



Greška krvnog uzorka

Nanesite krvni uzorak na novu mjernu traku



Mjerna traka je bila prerano odstranjena

Ponovite mjerenje sa novom mjernom trakom



NFC-veza prekinuta

Ponovite prijenos podataka

