

# GlucoMen<sup>®</sup> areo Kurzbedienungsanleitung

## Wie Sie eine Blutzuckermessung durchführen



Führen Sie einen neuen GlucoMen<sup>®</sup> areo Teststreifen oben in das Messgerät ein.



Gewinnen Sie einen Blutstropfen.



Tragen Sie einen Blutstropfen auf das Ende des Teststreifens auf.



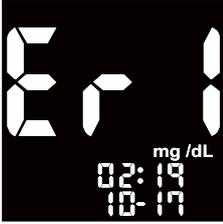
Nach 5 Sekunden erscheint das Messergebnis.



Verwenden Sie die Auswurf-taste, um den verwendeten Teststreifen hygienisch zu entfernen.



# GlucoMen<sup>®</sup> areo Displaymeldungen

Meldung	Was bedeutet die Meldung?	Was muss ich tun?
	Hardwarefehler	Wenden Sie sich an unser Serviceteam Telefon: (01) 230 85 10
	Teststreifen benutzt oder beschädigt	Verwenden Sie einen neuen Teststreifen
	Blutprobenfehler	Auf einen neuen Teststreifen mehr Blut auftragen
	Teststreifen zu früh entfernt	Messung mit einem neuen Teststreifen wiederholen
	NFC Verbindung unterbrochen	Datenübertragung wiederholen

