

Como manter o Diário Digital
da Diabetes sempre atualizado

Glucolog[®] M
Lite



1

Instale a app Glucolog Lite
da Menarini Diagnósticos,
no seu smartphone*

Descarregue aqui a sua app
ou diretamente da Playstore



A qualquer momento pode atualizar o seu Diário Digital
da Diabetes, apenas encostando o GlucoMen areo, ao
seu smartphone.



GlucoMen[®]
areo 2K
Glicemia + Cetonemia

Total Controlo da Diabetes



glucomenareo2k.pt
diabetessobcontrolo.pt | menarinidiag.pt
facebook.com/diabetessobcontrolo

Linha de Apoio ao Utilizador

800 200 468



GlucoMen[®]
areo 2K
Glicemia + Cetonemia

Guia Rápido do Utilizador



Como fazer um teste de glicemia ou de cetonemia



Introduza a tira no seu GlucoMen areo.



Faça a punção e aproxime a gota de sangue da entrada da tira.



O resultado aparecerá em 5 segundos.



Retire a tira usada pressionando o botão de ejeção.

Como rever os resultados em memória



Com o medidor desligado, pressione o botão “ligar”, por 2 segundos.



Quando surgir a palavra “mem” no ecrã, pressione os botões de seleção para escolher “GLU” (teste de glicemia) ou “KET” (teste de cetonemia). Pressione o botão “ligar” para seleccionar.



Para percorrer os resultados anteriores, vá pressionando os botões de seleção.



Para alterar a visualização dos resultados em memória, “GLU” para “KET” ou vice versa, volte ao ponto 1.

Como consultar médias dos resultados das glicemias



Com o medidor desligado, pressione o botão “ligar”, por 2 segundos.



Quando surgir a palavra “mem” no ecrã, selecione “GLU” (teste de glicemia) pressionando os botões de seleção. Pressione o botão “ligar” para confirmar.



Quando surgir o primeiro valor de glicemia em memória, pressione o botão “ligar” para aceder às médias.



Consulte as médias de 1, 7, 14, 30, 60 e 90 dias, pressionando o botão “ligar” para avançar na opção.