

● NFC

NFC (Near Field Communication) on innovatiivinen tiedonsiirtojärjestelmä, joka mahdollistaa verensokeritulosten siirtämisen **Glucomen® areo** -laitteesta älypuheliin ja tablettiin **yksinkertaisesti... viemällä ne lähekkäin!**

● A. MENARINI DIAGNOSTICS -SOVELLUS

Verensokeritietojen lataaminen älypuheliin ja tablettiin **NFC**-järjestelmällä on **nopeaa ja helppoa!**

Kun olet asentanut A.Menarini Diagnostics -sovelluksen voit:



Nähdä välittömästi verensokeritietojen graafiset esitykset ja tilastot **Glucolog® Lite** -sovelluksessa ja lähettää ne sähköpostitse lääkärille tai luotetulle henkilölle.



Lähetä ja jaa tuloksesi reaaliajassa testiviestillä **Glucolog® Mobile** -sovelluksella.

Alkuvalmistelu

Kohta 1

LATAA



- Lataa ja asenna mobiililaitteeseesi (älypuhelin ja/tai tablet) A. Menarini Diagnostics -sovellus (**Glucolog® Lite** ja/tai **Glucolog® Mobile**) joka on saatavissa Android-, BlackBerry- ja Windows 8 -versiona.

Kohta 2



- Aktivoi **NFC**-toiminto **Glucomen® areo** -mittarissa näiden yksikertaisten toimenpiteiden avulla:
1) Siirry asetusvalikkoon painamalla **⏻** 4 sekunnin ajan.
2) Selaa asetusvalikkoon painikkeilla **▲** tai **▼** kun näet **N**, paina **⏻**.
3) Valitse ON painamalla **▲** tai **▼**, vahvista painamalla **⏻** ja lopeta.

Tietojen lataaminen



- Vie **Glucomen® areo** -laitteen NFC-antenni lähelle (< 1 cm) **NFC**:llä varustetun laitteen antennia: tiedonsiirto alkaa automaattisesti ja kun se päättyy, mittarin näyttöön tulee End.